

spectrum zastosowań w ginekologii



spectrum
result oriented performance

Spectrum to najnowszej generacji system elektrochirurgiczny, który automatycznie dostosowuje się do potrzeb użytkownika.

Podłącz narzędzie i rozpocznij pracę.

SmartDevice System zidentyfikuje podłączone narzędzie. Automatycznie wybierze tryby, w których może ono być używane oraz przywoła sugerowane parametry pracy.

Spectrum możliwości i jeden cel, którym jest pełne wsparcie chirurga na sali operacyjnej.



ThermoStapler® w zabiegach histerektomii

ThermoStapler® jest szczególnie polecany w zabiegach histerektomii: waginalnej, laparoskopowej oraz brzusznej. Umożliwia efektywne zamykanie żył i tętnic macicznych oraz więzadeł podtrzymujących macicę. Dzięki wykorzystaniu techniki ThermoStapler® nie ma potrzeby czasochłonnego podwiązki naczyń, co efektywnie skraca czas trwania zabiegu.



ThermoStapler® z powodzeniem może być wykorzystywany w innych procedurach ginekologicznych takich jak: LAVH czy resekcje jajnika lub jajowodu.



Koagulacja argonowa w leczeniu endometriozy

Koagulacja argonowa (STANDARD ARGON) umożliwia bardzo szybką koagulację dużych powierzchni. Zapewnia skuteczną dewitalizację zmian endometrialnych. Jedną z głównych zalet koagulacji argonowej jest stała, minimalna głębokość efektu termicznego, co zmniejsza ryzyko perforacji. Użycie koagulacji argonowej ogranicza głębokość uszkodzeń termicznych tkanek, dzięki czemu skraca się również czas rekonwalescencji po zabiegu.



Histerektomia brzuszna



Histerektomia waginalna



Histerektomia laparoskopowa



Koagulacja argonowa endometriozy

Akcesoria SpectrumLine

932-14S Uchwyt elektrody argonowej, szeroki, 2 przyciski, kabel 3,5m, wtyk SDS/ LuerLock




932-032 Elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł. robocza 100mm, śr. 5mm




932-034 Elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł. robocza 350mm, śr. 5mm



801-23S ThermoStapler® - kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zakrzywione, dł. 23cm, gładkie, kablem 3 m, wtyk SDS

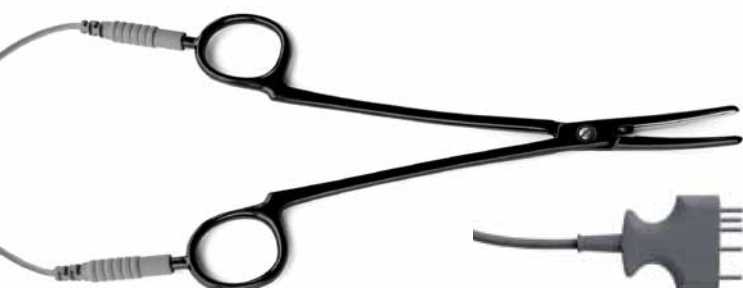

801-73S ThermoStapler® - kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, proste, dł. 23cm, gładkie, z kablem 3 m, wtyk SDS

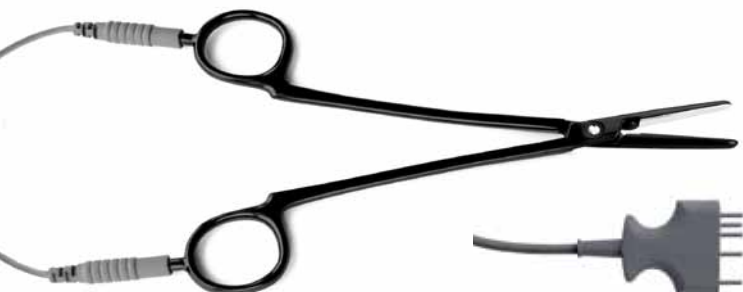

824-13S Uchwyt z kablem 3m, wtyk SDS, wielorazowy, do bipolarnego instrumentu laparoskopowego



824-134 Rurka zewnętrzna, śr. 5mm, dł. 340mm, wielorazowa do bipolarnego instrumentu laparoskopowego



824-031 Wkład dissektor Maryland, szeroki, dł. 340mm, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego



824-015 Wkład grasper bipolarny, okienkowy, zakrzywiony, dł. 340mm, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego



100-013 Aparat Elektrochirurgiczny spectrum



080-100 Wózek SpectrumLine do aparatów EMED, z szafką na butle argonowe (2x 5L/10L), koszyk



100-313 Włącznik nożny 2-przyciskowy MultiSwitch, bezprzewodowy

Pełen wybór akcesoriów znajdą Państwo w naszym katalogu.
Więcej informacji u przedstawicieli regionalnych i na stronie www.emed.pl

EMED SP. Z O. O. SP. K. | ul. Ryżowa 69a | 05-816 Opacz Kolonia
tel: +48 (22) 723 08 00 | fax: +48 (22) 723 00 81 | email: emed@emed.pl | www.emed.pl

2015.11.K22.PL

emed
confidence in performance